


ベッド上・リクライニング車いす上での食事介助に

日常生活で誤嚥予防姿勢を保つ

イージースワロー3045

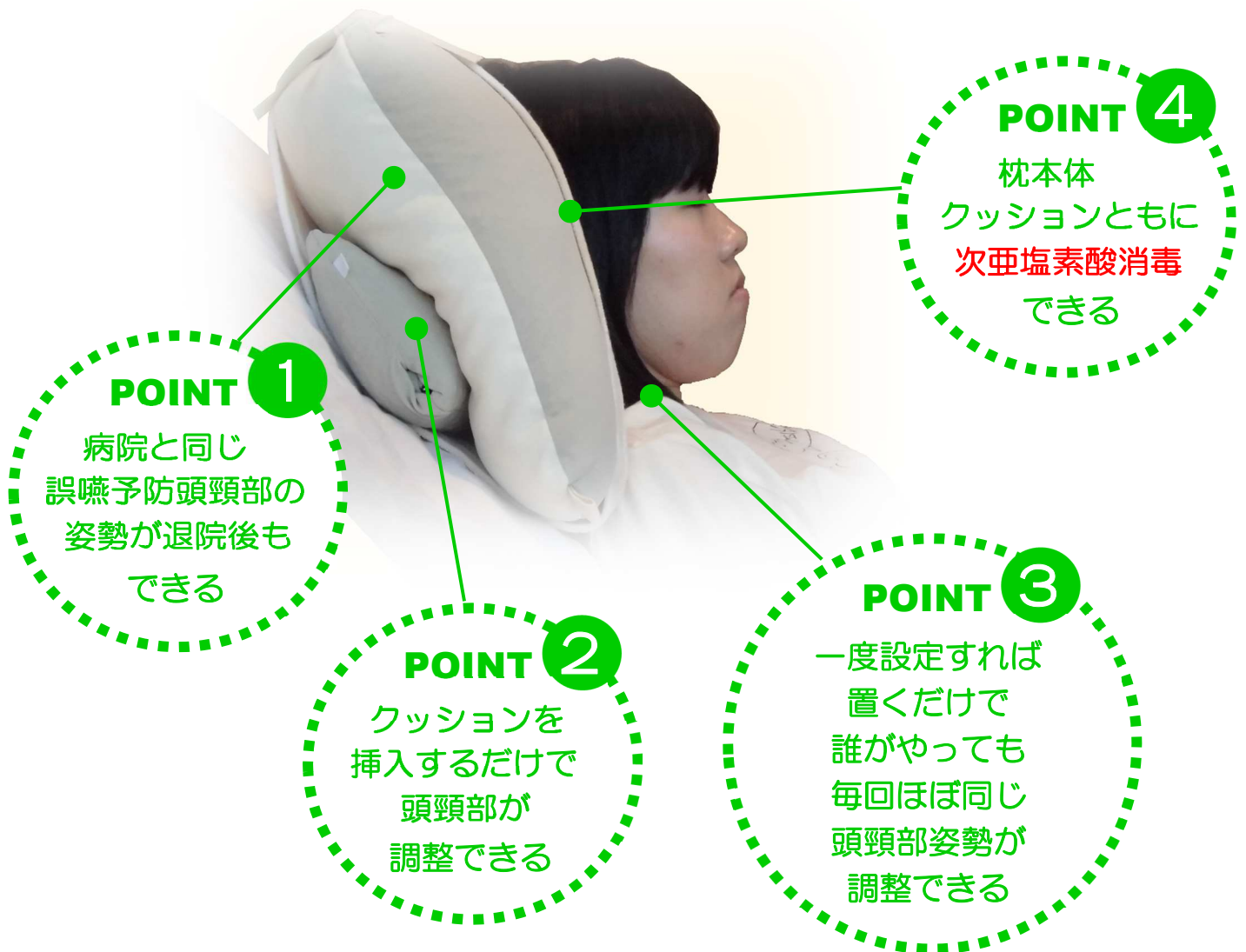

POINT 1

病院と同じ
誤嚥予防頭頸部の
姿勢が退院後も
できる

POINT 2

クッションを
挿入するだけで
頭頸部が
調整できる

POINT 3

一度設定すれば
置くだけで
誰がやっても
毎回ほぼ同じ
頭頸部姿勢が
調整できる

POINT 4

枕本体
クッションともに
次亜塩素酸消毒
できる

従来の枕やクッション、タオルではしにくかった
誤嚥予防頭頸部姿勢を保つ

※仕様やデザインは予告なしに変更になる場合があります。

枕+2つのクッションを組み合わせると簡単に姿勢調整ができる

「枕をたかくして、あごをひいて」

最も一般的な誤嚥予防頭頸部姿勢ができます。

頸部前屈突出



頸部前屈



製造・販売



誰もが楽しい食事を

KONAN MEDICAL LABORATORY

最適な角度に対応できる枕+2つの調整クッション



2種類の調整クッション(S・M)を枕底面に①～③の3カ所の挿入袋に入れることにより、毎回誰がやっても同じ最適な誤嚥予防頭頸部姿勢(詳しくは easyswallow.jp/)を調整することができます。微調整は本体枕または調整クッションを引っ張り移動させて行います。

頸部前屈姿勢の調整方法例

頸部前屈は、枕本体、S・Mクッション、タオルを使うと下写真のように5つの基本パターンが調整できます。

飲み込みやすい(誤嚥しにくい)目安

- あごと胸の間に握りこぶしが入るぐらい(4横指ぐらい)
- 首筋の緊張が緩い(筋張っていない)
- ごっくんしやすい(のど仏がスムーズに動く)



※飲み込みやすさは個人により、異なりますので、最適なクッションサイズと位置を調整して下さい。ピースが頸部から後頭部にかけてフィットすると気持ちよく安定します。

頭頸部の微調整

• 微調整は、枕と首の隙間を埋めるなどタオル1枚の調整で行えます。

• 挿入クッションは、食事に扱いません。保管中も抜かない限り枕の傾き形状は変わりません。

誤嚥防止の目安は、あごの先端と胸との間が指4本程度です。



リクライニング車いす・ベッドへの取付方法

●オプションのマジックテープ付き枕カバーを使用すると背もたれのメスマジックテープに取り付けることができます。




●ベッド取付用シート(オプション)ベッド取付用シートを使用すると、ベッド上・リクライニング車いすで使用できます。



VF検査(嚥下造影)からベッド、リクライニング車椅子へ

ベッド取付用シートを利用すれば、VF検査の飲み込みやすい頭頸部姿勢が、ベッド上・リクライニング車いす上で調整できます。

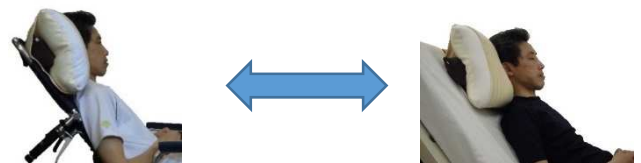

■ 注意事項

●針やカッターナイフなど、刃物や鋭利な物を本体に使用しないでください。●本品は可燃性ですので、タバコなど火気の近くでの使用は十分に注意ください。

■ 衛生上の注意事項

●滅菌はできません。●オゾン消毒はできます。●枕本体/クッションは0.1%次亜塩素酸消毒できます。マジックテープ付き枕カバーは、80度10分の熱消毒できます。●洗濯はぬるま湯で、手洗い後、脱水して下さい。乾燥機は避けて、陰干しして下さい。

※製品の仕様、価格は予告なく変更することがあります。

※イージースワローは医療器具ではありません。

※イージースワローは誤嚥防止を保証するものではありません。

イージースワロー-3045セット…枕本体、クッション(S・M)		13,000円
枕本体	520×300×100mm	
Sクッション	460×100×80mm	
Mクッション	460×140×100mm	
オプション		
マジックテープ付き枕カバー	590×950mm	2,500円
ベッド取付用シート(表面ビニールレザー・裏面ストップシート)	280×700mm	5,700円
枕本体/布帛(ポリエステル100%)、ニット(ポリエステル100%) ピース(中材:ポリスチレン、ポリエステル重合体) ピースクッション/ニット(ポリエステル100%) ピース(中材:ポリスチレン、ポリエステル重合体)		

イーゼースワローの頸部前屈調整方法

頸部前屈は、枕本体、Sクッション、Mクッション、市販タオルを使い
5つの基本パターンで対応できます。



パターン名	挿入力所ともの	枕の傾き
パターンⅠ ①最大の挿入袋にSクッションを挿入 タオルを①、②などに追加し微調整する。	③ Sクッション	
パターンⅡ ①幅の広い挿入袋にSクッションを挿入 ②幅の狭い挿入袋に3つ折にしたタオルを挿入 タオルを外してSクッションだけで使用したり、タオルを①、②、③などに追加し微調整する。	① Sクッション ② タオル	
パターンⅢ ①幅の広い挿入袋にMクッションを挿入 ②幅の狭い挿入袋に3つ折にしたタオルを挿入 タオルを外してMクッションだけで使用したり、タオルを②、③などに追加し微調整する。	① Mクッション ② タオル	
パターンⅣ ②幅の狭い挿入袋に3つ折にしたタオルを挿入 ③最大の挿入袋にMクッションを挿入 Mクッションの位置をずらしたり タオルを②、③などに追加し微調整する。	③ Mクッション ② タオル	
パターンⅤ ①幅の広い挿入袋にMクッションを挿入 ②幅の狭い挿入袋にSクッションを挿入 タオルを③に追加し微調整する。	① Mクッション ② Sクッション	

パターンⅤの使用例



パターンⅠの使用例



誤嚥防止の目安は、
あごの先端と胸との間
が指4本程度です。

- 枕の下にクッションやタオルを敷く調整と同じ感覚で調整できます。
- 一度調整すると次からは置くだけです。

- 微調整は、枕と首の隙間を埋めるなどタオル1枚の調整で行えます。
- 挿入クッションは、食事中に抜けません。保管中も抜かない限り枕の傾き形状は変わりません。

枕がずれ落ちないために

- むせたとき
- 頭を動かしたとき
- 身体を動かしたとき
- 背もたれを上げたとき

など、枕がずり落ちて背中とベッドの間に挟まってしまう。

このような、経験はございませんか？

イーゼースワローがずれ落ちないために

専用のマジックテープ付き枕カバーとベッド取付シートを用意しております。




マジックテープ付き枕カバー
590×950mm



ベッド取付シート
270×700mm
(表面：ビニールレザー、裏面：ストップシート)

- 背もたれのメスマジックテープに枕カバーのオスマジックテープを直接取付けることができます

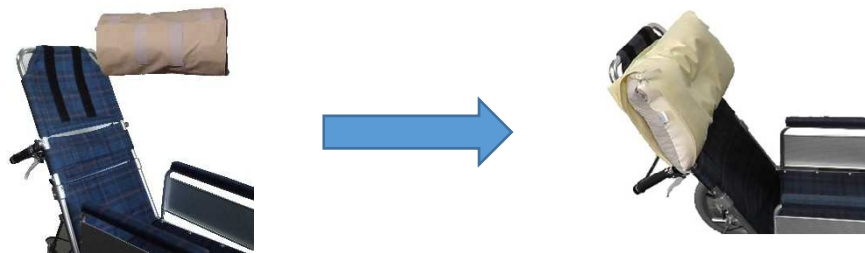

- ベッド取付用シートのメスマジックテープに枕カバーのオスマジックテープを取付け余ったシート部分をマットレスの下に差し込むと、ベッド上でイーゼースワローはずれ落ちません。



使用しないときは、
ベッド取付用シートを
イーゼースワローに
巻き付けて保管



ベッド取付用シートを
リクライニング車いすに引っ掛け
て使うと、マジックテープを外さ
ないで上下の位置決めや保管が楽
になります。