


リクライニング・ティルト車いすを快適に

日常生活で頭頸部姿勢を保つ

VF・FIT クッション

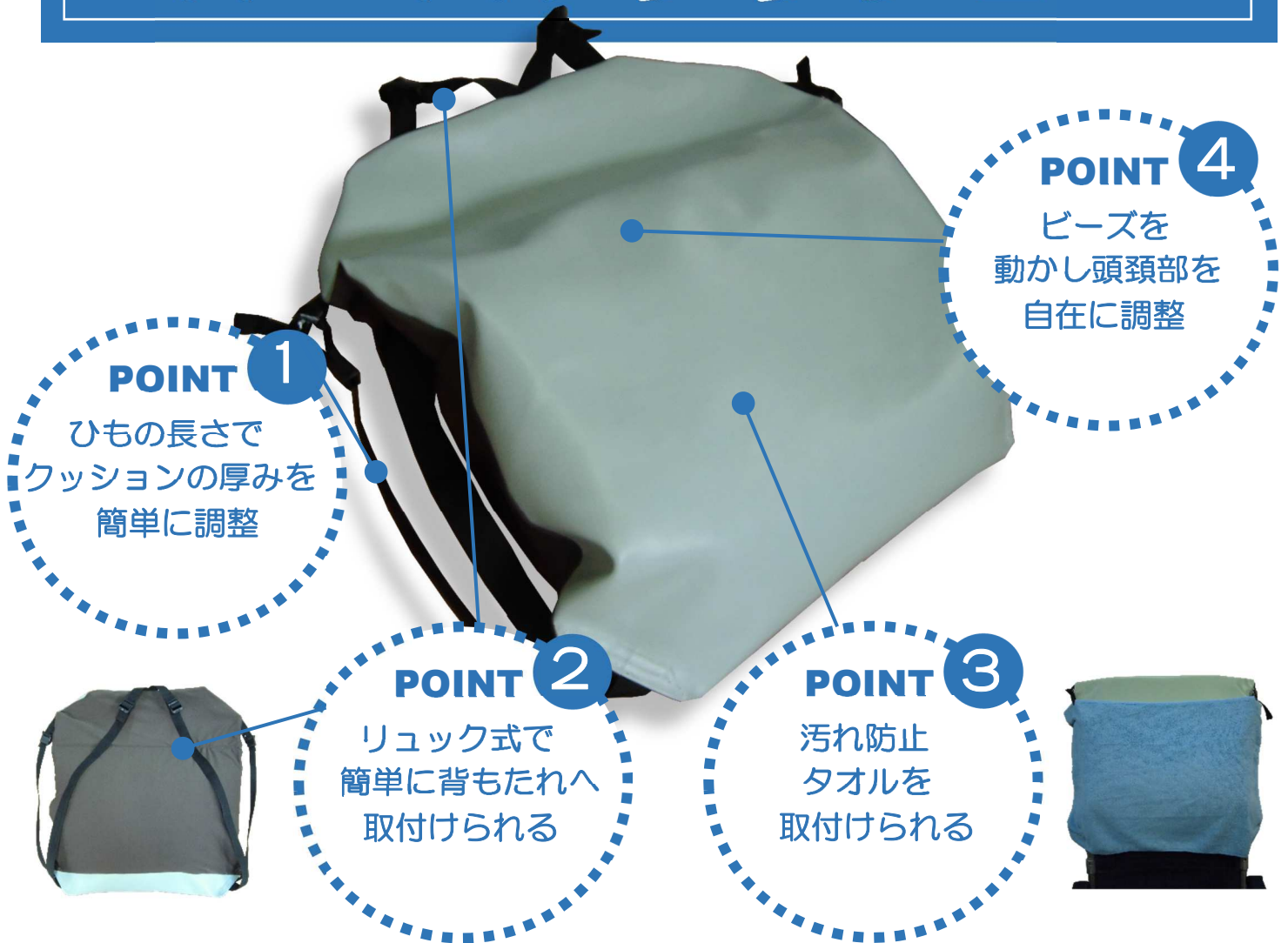

POINT 1

ひもの長さで
クッションの厚みを
簡単に調整

POINT 2

リュック式で
簡単に背もたれへ
取付けられる

POINT 3

汚れ防止
タオルを
取付けられる

POINT 4

ビーズを
動かし頭頸部を
自在に調整

従来のリクライニング・ティルト車いす標準枕では難しかった
頭頸部姿勢を簡単に調整でき保つことができます

※仕様やデザインは予告なしに変更になる場合があります。

肩甲骨から頸部・頭部にかけて大粒ビーズがしっかり保持



肩甲骨から
頸部までの
空間を埋める

首周りの筋肉の緊張
が緩む。適度なあご引
きが保てる

食事介助がしやすい

むせにくく
食べやすい。



のけぞっても
頭頸部が安定

頭部が動いても
大粒ビーズとレザーで
形状が崩れにくい

頭頸部が
安定するので

疲れにくい。

製造・販売



誰もが楽しい食事を

KONAN MEDICAL LABORATORY

POINT 1 ひもの長さでクッションの厚みを簡単に調整



左右のひもによる伸縮で
厚み調整

ボリューム（厚み）の簡単調整

厚み調整は、9cm から 15cm



型崩れしにくい大粒ビーズを使用

流動しにくい直径4~6mmの大粒
発泡ビーズを使用しています。



POINT 2 リュック式で簡単に背もたれへ取付けられる



アジャスター付き
取付ベルト

背もたれに簡単取付

アジャスターでひもを調整し、固定



ベルトの長さで位置調整

頭部の位置に応じて、クッションを
上下にずらし固定する。



POINT 3 汚れ防止タオルを取付けられる



タオルや不織布
で汚れを防ぐ



フィッシュクリップで、
タオル等を簡単取付

簡単！フィッシュクリップ



クリップ部を倒すと
口が開く

開いた口に
タオルを入れる

クリップ部を戻すと
タオルを固定

POINT 4 ビーズを動かして頭頸部を自在に調整



リクライニング面からビーズをかき
分けるようにし、頭頸部を調整して下
さい。ひもの長さを変えたり、肩口に
クッション下端を差し込んだりして
最適なポジションを調整して下さい。

VF・FITクッション仕様 VF-FIT02

サイズ(mm)	幅480×奥行き500×高さ90~150
材質	表生地/抗菌ビニールレザー(MRSA、大腸菌、黄色ブドウ球菌など)耐アルコール機能(ベンジン・エタノール) 裏生地/ナイロン81%、ポリウレタン19%ビーズクッション(中材:ポリスチレン、ポリエチレン重合体)
重量	500g

機能性レザーについて

●表面に特殊なフッ素処理を施すことで優れた「防汚機能」発揮し、汚れにくく汚れても簡単に拭き取れます。●優れた「抗菌機能」でMRSAや大腸菌・黄色ブドウ球菌などの菌の繁殖を抑え、衛生的です。●ベンジン・エタノール系溶剤で拭いても硬化しにくい。「耐アルコール機能」

注意事項

●針やカッターナイフなど、刃物や鋭利な物を本体に使用しないでください。
●本品は可燃性ですので、タバコなど火気の近くでの使用は十分に注意ください。

販売価格

VF-FITクッション 13,000 円(消費税・送料別途)

※製品の仕様・価格は予告なく変更する場合があります。